

# Gebrauchsanweisung

**Orlview Software**



**Inhalt**

1.1 Installation OrlView ..... 3  
1.2 Einschalten orlvision Endoskop ..... 3  
1.3 Einstellungen und Bedienung ..... 3

### **1.1 Installation OrlView**

Verwenden Sie den mitgelieferten USB-Stick nur mit einem medizinischen PC. Wählen Sie die Datei Orlview setup.exe aus und folgen den Installations-Anweisungen auf dem Bildschirm.

### **1.2 orlView Systemvoraussetzungen**

Für die Installation der Capture Basic Suite wird Ihnen geraten, mindestens folgende Systemvoraussetzung zu erfüllen:

≥ Windows 10

### **1.3 Einschalten orlvision Endoskop**

Nach erfolgreicher Installation können Sie das Laryngoskop mit Hilfe des Connection Cable mit dem medizinischen PC per USB-Schnittstelle verbinden.

Öffnen Sie das Bilddarstellungsprogramm „OrlView“. Es erscheint das Live-Bild. Mit einem Klick auf das Bild wird es zum Vollbild. Ein neuer Klick stellt die ursprüngliche Darstellung wieder her.

Rechts sind die bereits aufgenommenen und gespeicherten Bilder zu sehen. Links können Bildeinstellungen vorgenommen werden.

### **1.4 Einstellungen und Bedienung**

Die Bildeinstellungen im Life- Modus sind in Bild 1 dargestellt. Die Auswahl- und Einstellmöglichkeiten sind dort erklärt. Die Einstellungen beim Betrachten eines gespeicherten Bildes/Videos sind in Bild 2 gezeigt und kurz erklärt.


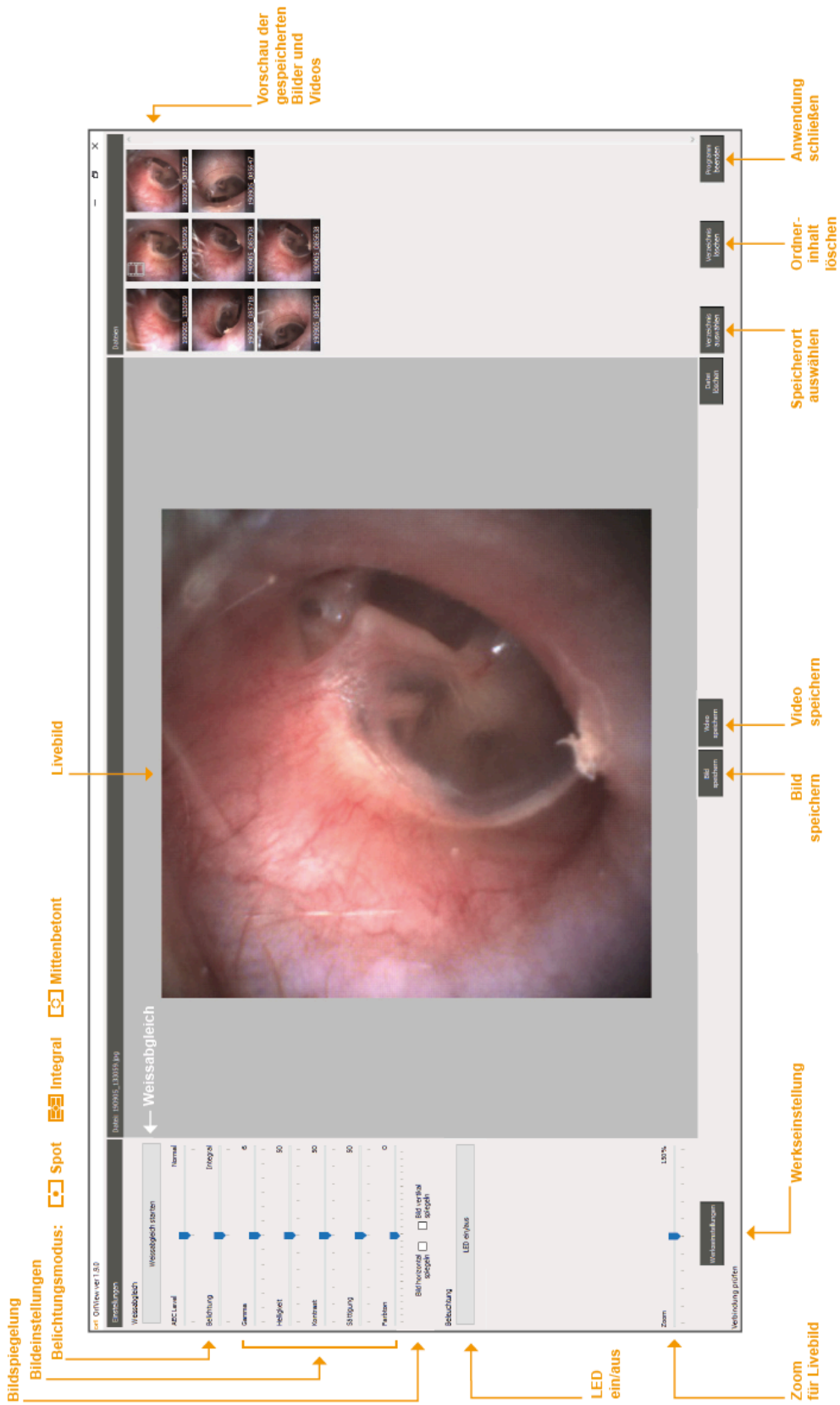


Bild 1: Modus Life Bild- Aufnahme

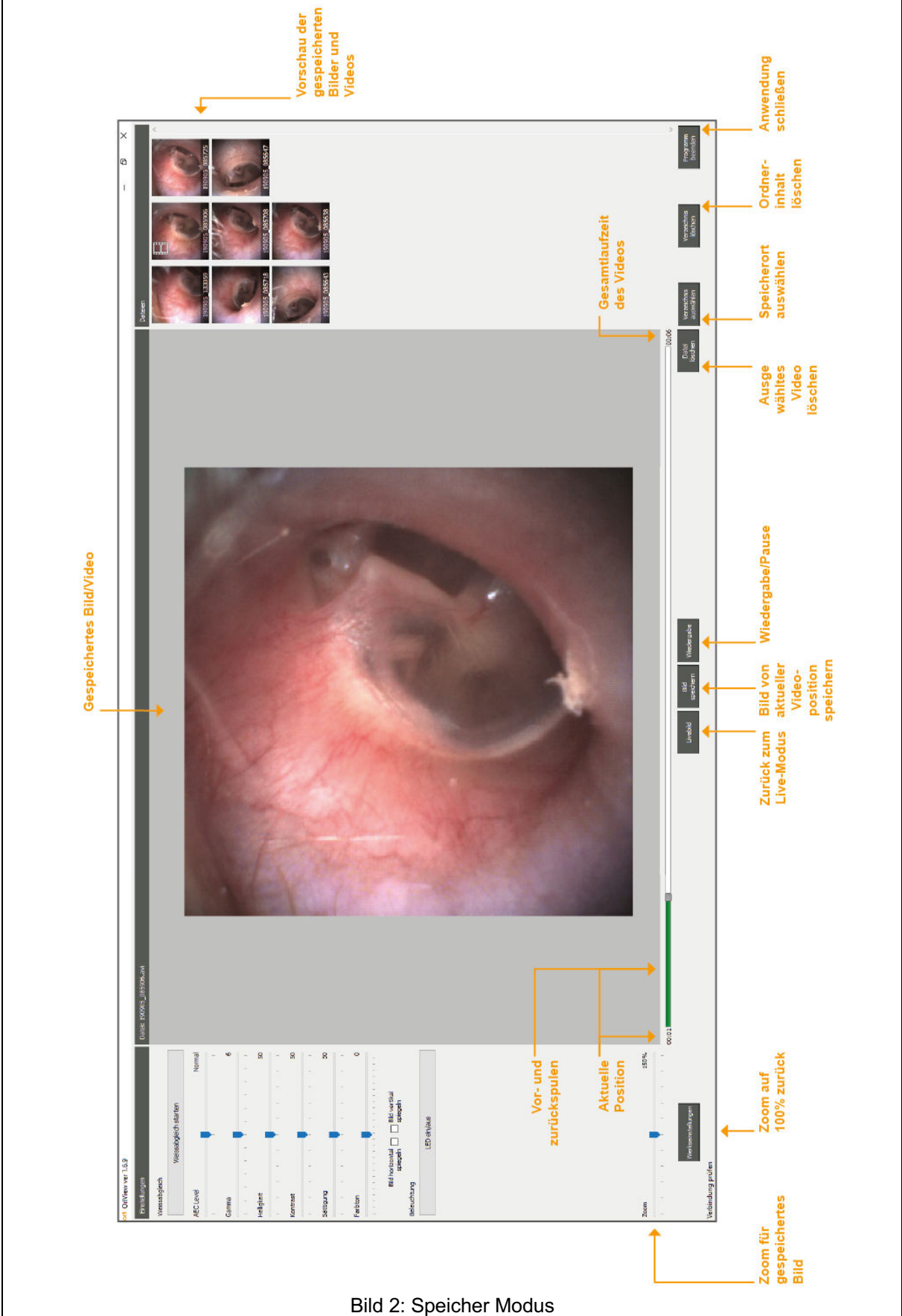

Gespeichertes Bild/Video

Vorschau der gespeicherten Bilder und Videos

Gesamtlauzeit des Videos

Vor- und zurückspulen

Aktuelle Position

Zoom auf 100% zurück

Zoom für gespeichertes Bild

Zurück zum Live-Modus

Bild von aktueller Video-position speichern

Wiedergabe/Pause

Ausgabe wähltes Video löschen

Speicherort auswählen

Ordnungsinhalt löschen

Anwendung schließen

Bild 2: Speicher Modus





orlvision GmbH  
Gewerbestr. 17  
D-35633 Lahnau  
Tel. +49(0)6441679298-0  
Fax +49(0)6441679298-99  
info@orlvision.com  
www.orlvision.com

Rev 01, 15.01.2021